

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Collecteurs 5G
de 9L Bas et 13L**

1

Positionner le couvercle sur la cuve: limite de remplissage et étiquette du même côté

Permet de contrôler le niveau de remplissage



Découvrez les collecteurs en réalité virtuelle sur Labelians expérience en scannant le QR Code

2

Assembler les 4 coins l'un après l'autre

4 clics auditifs confirment le montage correct et sécurisé



3

Selon votre protocole, indiquer le service, la date de mise en utilisation et/ou la date de fermeture définitive

Permet d'assurer la traçabilité



4

Fermeture provisoire & réouverture

A activer systématiquement quand le collecteur n'est pas utilisé : tirer et rabattre le volet de fermeture pour recouvrir l'ouverture. Réouvrir avant chaque utilisation en relevant le volet par la languette centrale



5

Fermeture définitive

Pour fermer le collecteur définitivement : appuyer fort le long du volet sur le devant (y compris la languette) : témoin de fermeture définitive = languette clipsée



Consignes de sécurité

- ✓ Le collecteur doit toujours être à portée de mains et utilisé avec son support
- ✓ Eliminer immédiatement les objets piquants coupants tranchants, après le soin
- ✓ Actionner systématiquement la fermeture provisoire entre deux utilisations
- ✓ Respecter impérativement la limite de remplissage du collecteur
- ✓ Vérifier l'intégrité de la fermeture définitive avant l'élimination finale