



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Collecteurs 5G
de 1.8L à 9L Haut**

1

Positionner le couvercle sur la cuve: limite de remplissage et étiquette du même côté

Permet de contrôler le niveau de remplissage



Découvrez les collecteurs en réalité virtuelle sur Labelians expérience en scannant le QR Code

2

Assembler les 4 coins l'un après l'autre

4 clics auditifs confirment le montage correct et sécurisé



3

Selon le protocole, indiquer le service, date de mise en utilisation et/ou date de fermeture définitive

Permet d'assurer la traçabilité



4

Fermeture provisoire/réouverture

A activer systématiquement quand le collecteur n'est pas utilisé : 1 clic central.

Réouvrir avant chaque utilisation, en appuyant ou en tirant sur la languette



5

Fermeture définitive

Pour fermer le collecteur définitivement : appuyer fort sur le couvercle, avec les deux pouces : 3 clics - > la languette s'insère dans le renforcement : témoin de fermeture définitive



Consignes de sécurité

- ✓ Le collecteur doit toujours être à portée de mains et utilisé avec son support
- ✓ Eliminer immédiatement les objets piquants coupants tranchants, après le soin
- ✓ Actionner systématiquement la fermeture provisoire entre deux utilisations
- ✓ Respecter impérativement la limite de remplissage du collecteur
- ✓ Vérifier l'intégrité de la fermeture définitive avant l'élimination finale

INSTRUCTION COLLECTEUR MOEYN