



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Collecteurs 5G
de 0.2L à 0.6L

Découvrez les collecteurs en réalité virtuelle sur Labelians expérience en scannant le QR Code



1

Tirer la anse

Permet d'assurer la prise en main mono-manuelle du conteneur



2

Selon le protocole, indiquer le service, date de mise en utilisation et/ou date de fermeture définitive

Permet d'assurer la traçabilité



3

Ne jamais dépasser la limite de remplissage

Dans tous les cas, fermer définitivement dès que la limite de remplissage est atteinte



5

Fermeture provisoire et définitive

La fermeture provisoire doit être activée quand le collecteur n'est pas utilisé: rabattre le volet de fermeture jusqu'à couvrir l'ouverture.

Pour fermer le collecteur définitivement : appuyer fermement sur le volet de fermeture jusqu'à l'obtention du clic sonore



Consignes de sécurité

- ✓ Le collecteur doit toujours être à portée de mains et utilisé avec son support
- ✓ Eliminer immédiatement les objets piquants coupants tranchants, après le soin
- ✓ Actionner systématiquement la fermeture provisoire entre deux utilisations
- ✓ Respecter impérativement la limite de remplissage du collecteur
- ✓ Vérifier l'intégrité de la fermeture définitive avant l'élimination finale