




Instructions d'utilisation des emballages carton

Mise en forme de l'emballage


Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme

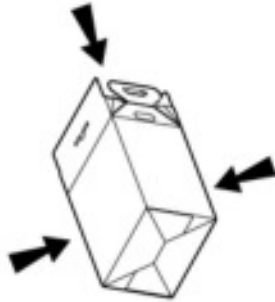

Plier et rabattre les poignées



Jupper la sache

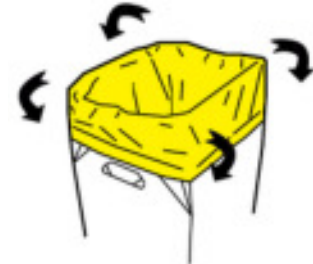

Fermeture


Faire un premier nœud, plier en col de cygne et faire un second nœud




Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1



Fermeture provisoire

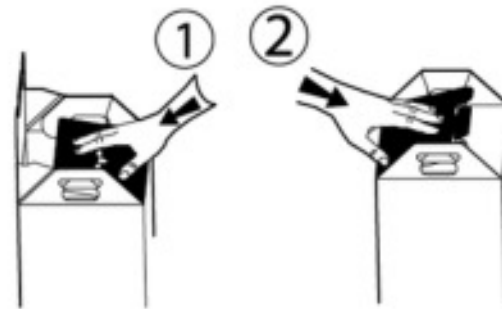

Fermeture définitive

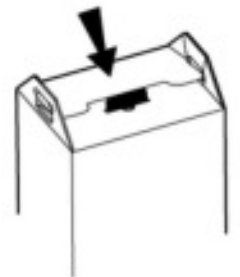

DOCINSEBALL - 01/22



Quelques modèles d'emballages carton



Recyclable



Matière infectieuse
Classe 6.2



Homologués UN 3291

