

RECUEIL URINAIRE ECBU

Instructions d'utilisation
du flacon avec prise
sous-vide

Scannez le QR code pour découvrir la notice

RECUEIL URINAIRE ECBU

Comment faire ?

- 1 Lavez-vous soigneusement les mains
- 2 Effectuez une toilette intime (avec une lingette nettoyante)
- 3 Débouchez le flacon* et posez-le à l'envers sur une surface propre
- 4 Commencez à uriner le 1er jet dans les toilettes
- 5 Revissez le bouchon à fond

Puis dans le flacon sans dépasser le niveau "MAX"

*Ne jamais toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon

APPORTEZ VOTRE FLACON SOUS 2 HEURES AU LABORATOIRE

labelians.fr

LABELIANS
Groupe CML-ID

DOCURIECBULABOKA4

Procédure pour le laboratoire

- 1 Agitez doucement le flacon pour l'homogénéiser
- 2 Soulevez partiellement l'étiquette protectrice (ne pas retirer)
- 3 Ordre de prélèvement :
1- sans additif
2- avec acide borique
- 4 Insérez le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube jusqu'à son remplissage complet
- 5 Retirez le tube et recollez entièrement l'étiquette protectrice
- 6 Pour le tube contenant de l'acide borique : retournez-le délicatement 8 à 10 fois